

Acetocaustin®

Terapia kwasowa

PRZED ZASTOSOWANIEM ACETOCAUSTIN TERAPII KWASOWEJ NA BRODAWKI NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA, NAWET JEŚLI PRODUKT BYŁ JUŻ WCZEŚNIEJ STOSOWANY. INFORMACJE MOGŁY ZOSTAĆ ZMIENIONE NA PODSTAWIE NOWYCH BADAŃ I OBSERWACJI W CZASIE, KTÓRY UPŁYŃAŁ OD OTWARCIA OSTATNIEGO OPAKOWANIA. NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z NIEJ PONOWNIE. DLA DOROSŁYCH I DZIECI (OD 4. ROKU ŻYCIA).

DO CZEGO JEST PRZEZNACZONY ACETOCAUSTIN TERAPIA KWASOWA NA BRODAWKI?

Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki jest wyrobem medycznym przeznaczonym do leczenia brodawek pospolitych. Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki zawiera kwas monochlorooctowy, substancję działającą keratolitycznie na skórę. Brodawka rozpływa się, warstwa po warstwie. Kwas monochlorooctowy niszczy komórki zawierające wirusa wywołującego brodawki.

Zalegą stosowania wyrobu medycznego Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki jest to, że nakładanie bezpośrednio na brodawkę nie boli, co oznacza, że może być również stosowany u dzieci, jeśli zostanie prawidłowo nałożony przez osobę dorosłą.

Terapia kwasowa na brodawki Acetocaustin może być stosowana jedynie na brodawki pospolite, które:

- występują głównie na dloniach i stopach;
- mają ten sam kolor co skóra;
- mają obwód wahający się od mniej niż milimetra do ponad centymetra;
- występują jednocześnie w skupiskach po kilka brodawek;

Do zakażenia często dochodzi poprzez bezpośredni kontakt, ale także przez ręczniki lub skażone powierzchnie. Drapanie się i obgryzanie paznokci zwiększają ryzyko zakażenia.



Nie stosować wyrobu medycznego Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki w przypadku brodawek szorstkich:

- mogą występować w różnych rozmiarach i kolorach;
- średni obwód wynosi od 0,5 do 1 cm;
- często na początku wyglądają jak plamy w kolorze skóry, żółto-brązowym lub szaro-brązowym, później powiększają się i grubieją;
- wyglądają, jakby znajdowały się na powierzchni skóry i były łatwe do zdrapania, ale w rzeczywistości są mocno przytwierdzone do skóry;
- mogą wystąpić w dowolnym miejscu na ciele, z wyjątkiem wewnętrznej części dłoni, podeszwy stóp oraz ust. Najczęściej występują na klatce piersiowej, plecach, twarzy i szyi.



Brodawka podeszwowa (verruca plantaris):

- Występuje na spodzie/podeszwie stopy;
- Zazwyczaj jest płaska i otoczona szorstką, pogrubioną skórą;
- Przypomina modele;
- Może zawierać czarne kropki lub drobne ziarenka.



Instrukcja użycia (zapobieganie oparzeniom):

CO ROBIĆ:

- Do nakładania wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Stosować wyłącznie na dlonie i stopy! Nie stosować na inne części ciała.
- Wetrzeć wazelinę lub masę cynkową w otaczającą skórę, aby ją chronić.
- Umieścić butelkę na twardym podłożu odpornym na działanie żrącego płynu.
- Nakładać na brodawkę/kurczawkę tylko raz.
- Nakładać na brodawkę tylko raz w tygodniu.
- Zadbać aby płyn miał kontakt jedynie z brodawką/kurczawką.
- Unikać kontaktu ze skórą.
- Po nałożeniu płynu należy pozostawić go do wyschnięcia.



- Pozostawić brodawkę/kurczawkę odkrytą.
- Rezultat będzie widoczny po jednym tygodniu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



CZEGO NIE ROBIĆ:

- Osoby poniżej 18. roku życia nie powinny nakładać preparatu.
- Nie nakładać na brodawki/kurczawkę na innej części ciała niż dlonie i stopy.
- Nie nakładać na brodawkę, która w całości lub częściowo znajduje się pod paznokciem.
- Nie stosować na brodawki, które występują całkowicie lub częściowo na podeszwie stopy (brodawki podeszwowe).
- Nie pozwalać na kontakt płynu ze zdrową skórą.
- Nie stosować, gdy ręce się trzęsą lub palce są sztywne.
- Nie nakładać na brodawkę więcej niż jeden raz.
- Nie przykrywać brodawki/kurczawki po zastosowaniu.
- Nie stosować na znamiona, guzki mięczaka zakaźnego, rany otwarte, przebarwienia, brodawki podeszwowe, brodawki starcze, ciemno zabarwione, owłosione lub dziwnie wyglądające brodawki.
- Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.
- Nie powtarzać zabiegu przed upływem jednego tygodnia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie stosować wyrobu medycznego Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki:

- U dzieci poniżej 4. roku życia;
- W przypadku nadwrażliwości na jeden lub więcej składników ani na twarz (unikaj kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi nosa lub ust);
- Na brodawki narządów płciowych lub w okolicy narządów płciowych;
- Na znamiona, guzki mięczaka zakaźnego, rany otwarte, pieprzyki, brodawki starcze (brązowe), brodawki podeszwowe, ciemno zabarwione, owłosione lub dziwnie wyglądające brodawki;
- Na czerwone, podrażnione lub zakażone brodawki;
- Bezpośrednio po chirurgicznym usunięciu brodawki, zamrożeniu brodawki (krioterapia) lub zabiegu laserowym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy po zabiegu skóra jest zaczerwieniona lub bolesna. W takim przypadku należy odczekać co najmniej 4 tygodnie, aż zaczerwienienie lub stan zapalny skóry całkowicie znikną. Dopiero wtedy można ponownie rozpocząć stosowanie terapii kwasowej na brodawki Acetocaustin;
- Podczas ciąży lub karmienia piersią;
- Na brodawkach, które występują całkowicie lub częściowo pod paznokciem.
- Więcej niż raz na brodawkę (powtarzać tylko w razie potrzeby po tygodniowej przerwie).
- Nie stosować na brodawki, które występują całkowicie lub częściowo na podeszwie stopy (brodawki podeszwowe).

Podczas stosowania wyrobu medycznego Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki należy zachować szczególną ostrożność:

- w przypadku wątpliwości dotyczących diagnozy (zmiana skórna nie może zostać jednoznacznie zdiagnozowana jako brodawka);
 - w przypadku zaburzeń odporności (np. jeśli przyjmowane są leki cytotatyczne);
 - w przypadku cukrzycy lub innych dolegliwości, takich jak choroby naczyniowe utrudniające gojenie się ran.
- W takich przypadkach nie wolno stosować terapii kwasowej na brodawki Acetocaustin bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

OSTRZEŻENIA

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Używać z najwyższą ostrożnością. Produkt Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki jest żrący.
- Jeśli dojdzie do kontaktu zdrowej skóry z płynem, należy spłukać ją wodą. Jeśli pomimo tych środków ostrożności skóra zostanie podrażniona, należy postępować tak samo, jak w przypadku oparzenia.
- Skontaktować się z lekarzem, jeśli dolegliwości nie ustępują.
- Po użyciu prawidłowo zamknąć butelkę i przechowywać ją w pozycji pionowej.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci, osoby starsze i o niższym stopniu sprawności funkcjonalnej muszą być nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Unikać kontaktu z odzieżą, tkaninami, obrobami lub skórą.
- Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia pęcherzy.
- Należy na brodawkę nie więcej niż raz i powtórzyć tylko w razie potrzeby po tygodniowej przerwie.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Terapia kwasowa na brodawki Acetocaustin może powodować pewne działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania terapii kwasowej

na brodawki Acetocaustin, obejmują podrażnienie skóry, uczucie pieczenia, zaczerwienienie skóry lub reakcje związane z nadwrażliwością. Jeśli którekolwiek z tych działań niepożądanych stanie się ciężkie lub jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane niewymienione w niniejszej instrukcji użycia, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

INTERAKCJA Z INNYMI LEKAMI

Jak dotąd, nie stwierdzono interakcji z żadnymi innymi lekami.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACETOCAUSTIN TERAPIA KWASOWA NA BRODAWKI

Butelka zawierająca 2 ml mieszaniny kwasu monochlorooctowego (50%) i wody oczyszczonej (50%). Specjalny aplikator służy do podawania preparatu na brodawkę.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Wyrób medyczny Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki należy przechowywać w temperaturze 15–25°C w suchym i ciemnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu i w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Data ważności jest podana na spodzie opakowania. Po otwarciu nie używać dłużej niż 4 tygodnie.

Więcej informacji na temat terapii kwasowej na brodawki Acetocaustin można znaleźć na stronie www.acetocaustin.com. W sprawie wszelkich zapytań dotyczących produktów prosimy kontaktować się z dystrybutorem.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Znaki i symbole ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu oraz instrukcje użytkowania mają zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i prawidłowego korzystania z tego produktu oraz ochrony użytkownika i innych osób przed urazami. Symbole zostały wyjaśnione w poniższej tabeli:

Symbolu	Objaśnienie
	Symbol producenta
	Symbol wskazujący na konieczność zapoznania się z instrukcją użycia
	Symbol wskazujący na konieczność zachowania ostrożności podczas używania wyrobu
	Symbol daty ważności
	Symbol wskazujący, że produkt jest wyrobem medycznym
	Ostrzeżenie: substancja żrąca
	Nieodpowiedni dla dzieci w wieku 3 lat i młodszych
	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
	Nieodpowiedni dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią
	Symbol numeru serii
	Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C
	Symbol oznaczający unikalny identyfikator urządzenia

JAK STOSOWAĆ ACETOCAUSTIN TERAPIA KWASOWA NA BRODAWKI?


(DO NAKŁADANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY DOROSŁE):

Wyrób medyczny Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki

naależy stosować z najwyższą ostrożnością. Roztwór jest żrący. Należy zachować szczególną ostrożność podczas nakładania go na trudniej dostępne części dłoni lub stóp. Dotyczy to w szczególności osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub z zaburzonymi funkcjami motorycznymi (drżenie rąk, sztywność palców).

- Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki ma nakrętkę uniemożliwiającą otwarcie przez dzieci, którą można odkręcić w następujący sposób: umieścić butelkę na twardym podłożu, które jest odporne na działanie żrącego płynu. Unikać kontaktu z odzieżą, tekstyliami lub obrusami. Aby otworzyć butelkę, należy nacisnąć nakrętkę, jednocześnie obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Przed nakładaniem zdjęciem nakrętki z butelki, nałożyć obficie nałożyć wazelinę lub masę cynkową na zdrową skórę wokół brodawki.
- Zdjąć nakrętkę z butelki.
- Następnie nałożyć niewielką ilość preparatu Acetocaustin na brodawkę za pomocą szpatułki (nie dopuścić do kapania płynu). Upewnić się, że preparat Acetocaustin nakładany jest tylko na brodawkę i tylko raz.
- Pozostawić na chwilę do wyschnięcia i nie przykrywać brodawki. Ostrożnie zamknąć butelkę po użyciu. Wyrób medyczny Acetocaustin terapia kwasowa na brodawki nie należy stosować częściej niż raz w tygodniu.

Potrzeba tygodnia, aby płyn rozpuścił wierzchnią warstwę brodawki, więc efekt nie jest natychmiastowy. W zależności od wielkości i grubości brodawki może być konieczne powtórzenie leczenia preparatem Acetocaustin po tygodniu. Nie powtarzać zabiegu przed upływem jednego tygodnia.

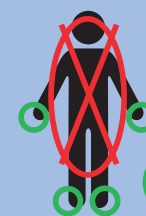

Aplikować na brodawki pospolite tylko na dloniach i stopach

4+ UŻYWAĆ TYLKO W WIEKU



OSTRZEŻENIE: UWAGA NA OPARZENIA. ZAPOZNACZ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYCIA PRZED ZASTOSOWANIEM!

PRODUCENT
TheOTCLab B.V.
Fred. Roeskestraat 115,
1076 EE, Amsterdam
The Netherlands

DYSTRYBUTOR
Salveo Poland Sp. z o.o.
Okólna 83, 83a lok.5
1076 EE, Amsterdam
Polska