

Acetocaustin®

Пластир за премахване на брадавици

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПЛАСТИР ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БРАДАВИЦИ АЦЕТОКАУСТИН®/ АЦЕТОКАУСТИН, ДОРИ АКО ВЕЧЕ ИМАТЕ ОПИТ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА. ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА Е АКТУАЛИЗИРАНА ВЪЗ ОСНОВА НА НОВИ ДАННИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МОМЕНТА, В КОЙТО СЕ ОТВОРИЛИ ПОСЛЕДНАТА СИ ОПАКОВКА. СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕГЛЕДАТЕ ОТНОВО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, ПОДХОДЯЩ ЗА ВАЪЗРАСТНИ И ДЕЦА (НАД 4 ГОДИНИ).

КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АЦЕТОКАУСТИН ПЛАСТИР ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БРАДАВИЦИ?

Пластирът за премахване на брадавици Ацетокаустин е медицинско изделие за лечение на обикновени (Verrucae vulgares) и плантарни брадавици (Verrucae plantares). Пластирът за премахване на брадавици Ацетокаустин съдържа 40% салицилова киселина – вещество, което има кератолитично действие върху кожата. Под въздействието ѝ брадавицата постепенно се отстранява слой по слой. Салициловата киселина подпомага отстраняването на тъканта, засегната от вируса, причинителя на брадавицата.

Предимството при използването на пластира за премахване на брадавици Ацетокаустин е, че приложението му директно върху брадавицата не причинява болка. Това позволява продуктът да бъде използван и при деца, когато се прилага правилно от възрастни.

Начин на приложението: (Да се прилага само от възрастни)

- Накиснете засегнатата област с брадавицата в топла вода за 5 минути преди приложението.
- Почистете и подсушете кожата преди употреба на пластира и се уверете, че по зоната няма кремове и масла.
- Извадете един пластир, отстранете защитното фолио от задната страна, като избягвате да докосвате залепващия слой.
- Поставете пластира така, че централната част със салицилова киселина да поладне директно върху брадавицата, като се уверите, че прилепва плътно към кожата.
- Оставете пластира върху засегнатата зона, докато започне да се разхлабва и отлепва. Премахнете го най-късно до 48 часа.
- Накиснете засегнатата зона в топла вода за 5 минути, след което внимателно отстранете мъртвата кожа. Повтаряйте процедурата при необходимост до 14 дни.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте Ацетокаустин пластир за премахване на брадавици:

- При деца под 4-годишна възраст – само под лекарско наблюдение.
- При лица с диабет, свръхчувствителност към салицилова киселина или нарушено кръвообращение.
- По време на бременност или кърмене, както и при деца — използвайте само под наблюдение на медицински специалист.
- За лечение на генитални брадавици или в областта на гениталиите.
- Не трябва да се използва в близост до очите, нито върху дълбоки рани с тесни отвори.
- Увреждане на кожата ще настъпи, ако здравата кожа влезе в контакт със салицилова киселина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предназначен само за външна употреба

- Свържете се с Вашия лекар, ако оплакванията Ви не отшумят.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Употребата при деца, възрастни хора и лица с увреждания трябва да се извършва под наблюдението на възрастни.
- Избягвайте контакт с дрехи, текстил, покривки или кожни изделия.
- Да не се използва повторно.
- Извършвайте внимателно по начин, предотвратяващ кръстосано замърсяване.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Възможно е пластирът за премахване на брадавици Ацетокаустин да предизвика някои странични реакции, но те не се проявяват при всички потребители. Страничните ефекти, които могат да възникнат при употребата на пластира за премахване на брадавици Ацетокаустин, са раздразнена кожа, усещане за парене, зачервяване на кожата или реакции на свръхчувствителност. Ако някой от тези странични реакции стане сериозна или ако забележите някакви странични реакции, които не са посочени в тези инструкции за употреба, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВА

Според наличната информация не са известни взаимодействия с други лекарства.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АЦЕТОКАУСТИН ПЛАСТИР ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БРАДАВИЦИ

Пластирите за премахване на брадавици Ацетокаустин са изработени от Moleskin текстил, изцяло покрит с лепилен субстрат, съдържащ 40% салицилова киселина. Една опаковка съдържа 20 ПЛАСТИРА Ацетокаустин за премахване на брадавици.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте пластирите за премахване на брадавици Ацетокаустин при температура 0 – 40°C, на сухо и тъмно място в оригиналната опаковка и на място, недостъпно за деца.



Срокът на годност е посочен върху вторичната опаковка.

За повече информация относно пластира за премахване на брадавици Ацетокаустин посетете www.acetocaustin.com. За всички запитвания относно продукти се свържете с дистрибутора.

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

Пластирът за премахване на брадавици Ацетокаустин е медицинско изделие от клас IIa, съгласно Директива 93/42/ЕО.

Отпуска се без лекарско предписание. Вижте инструкциите за употреба относно предпазни мерки, предупреждения и противопоказания.




ДИСТРИБУТОР

Ес енд Ди Фарма Логистикс БГ ЕООД
Световен Търговски Център – Интерпрод
офис 102/Б
бул. Драган Цанков 36
1057 София / България
тел.: (02) 971 7900
факс: (02) 971 46 56

EC REP Ltd.
5 Fitzwilliam Square East
Dublin 2, D02 R744, Ирландия

Пластирът за премахване на брадавици Ацетокаустин се произвежда изключително от Pharmaplast s.a.e. за TheOTCLab:

Pharmaplast S.A.E
Amria, Free zone 23512
Alexandria, Египет

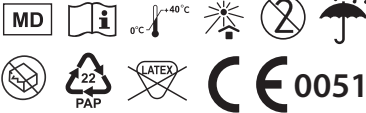

ОБЯСНЕНИЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЯТА: Предупредителните знаци и обозначенията върху опаковката и инструкциите за употреба са от съществено значение, за да се гарантира, че използвате този продукт безопасно и правилно, и за да предпазите себе си и останалите от нараняване. Обозначенията са обяснени в таблицата по-долу:

Символ	Пояснения
	Обозначение за производителя
	Обозначение, което указва, че трябва да се консултирате с инструкциите за употреба
	Обозначение, което указва, че е необходимо повишено внимание при работа с медицинското изделие
	Обозначение за датата на изтичане на срока на годност
	Обозначение, което указва, че продуктът е медицинско изделие
	Обозначението указва, че продуктът трябва да се пази от слънчева светлина.
	Указва медицинско изделие, което е предназначено за еднократна употреба.
	Да се съхранява на място, недостъпно за деца
	Да не се използва от бременни жени или по време на кърмене
	Обозначение за номера на партидата
	Продуктът трябва да се съхранява между 0°C и 40°C
	Указва медицинско изделие, което не трябва да се използва, ако опаковката е била повредена или отворена.
	Указва наличието на естествен каучук или сух естествен латекс като материал, използван в медицинското изделие или в неговата опаковка, което може да предизвика алергични реакции.
	Упълномощен представител в Европейската общност / Европейски Съюз