

Acetocaustin®

Náplast na bradavice



PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU ACETOCAUSTIN NÁPLAST NA BRADAVICE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ, I KDYŽ JSTE PRODUKT UŽ DŘÍVE POUŽÍVALI. UVEDENÉ INFORMACE SE MOHLY OD OTEVŘENÍ POSLEDNÍHO BALENÍ NA ZÁKLADĚ NOVÝCH VÝZKUMŮ A POZNATKŮ ZMĚNIT. TENTO NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD, ŽE DO NĚJ BUDETE POTŘEBOVAT ZNOVU NAHLÉDNOUT. PRO DOSPĚLÉ A DĚTI (OD 4 LET)

K ČEMU SE PŘÍPRAVEK ACETOCAUSTIN NÁPLAST NA BRADAVICE POUŽÍVÁ?

Acetocaustin náplast na bradavice je zdravotnický prostředek pro léčbu běžných bradavic. Acetocaustin náplast na bradavice obsahuje 40 % kyseliny salicylové, látky, která má na kůži keratolytický účinek. Bradavice rozpouští vrstvu po vrstvě s tím, jak kyselina salicylová ničí buňky, které obsahují virus bradavic.

Výhodou přípravku Acetocaustin náplast na bradavice je nebolestivá aplikace přímo na bradavici. To znamená, že jej lze používat i u dětí, pokud aplikaci provádí dospělá osoba správným způsobem.

Způsob použití: (aplikaci smí provádět pouze dospělí)

- Před aplikací namočte bradavici na 5 minut do teplé vody.
- Očistěte a osušte pokožku a zkontrolujte, že je místo bez stop krémů a olejů.
- Vyjměte jednu náplast a odstraňte ze zadní strany fólii. Nedotýkejte se lepicí strany.
- Nalepte náplast tak, aby se střed s účinnou látkou nacházel přímo na bradavici, a ujistěte se, že okraje jsou hladké.
- Ponechte náplast na místě, dokud se nezačne odlepovat. Náplast je nutné odstranit nejpozději po 48 hodinách.
- Před odstraněním uvolnění kůže namočte postižené místo na 5 minut do teplé vody.
- Opakujte tento postup podle potřeby po dobu až 14 dnů.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte přípravek Acetocaustin náplast na bradavice:

- U dětí mladších 4 let (pouze pod dohledem lékaře)
- Pokud jste diabetik, při přecitlivělosti na kyselinu salicylovou nebo pokud máte potíže s krevním oběhem.
- U těhotných žen a dětí: používejte zdravotnický prostředek pouze pod dohledem lékaře.
- Na genitální bradavice nebo bradavice v oblasti genitálií.
- Nepoužívejte v blízkosti očí ani na hlubokých ranách.
- Při kontaktu zdravé pokožky s kyselinou salicylovou dojde k jejímu poškození.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud potíže neustoupí, kontaktujte svého lékaře
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí
- Při použití dětmi, staršími osobami a osobami s fyzickým nebo duševním omezením je nutný dohled dospělé osoby.
- Zabraňte kontaktu s oděvy, textilem, ubrusem nebo pokožkou.
- Nepoužívejte opakovaně.
- Likvidujte opatrně způsobem, který zabrání křížové kontaminaci.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Acetocaustin náplast na bradavice může způsobovat některé nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u všech osob. Mezi nežádoucí účinky přípravku Acetocaustin náplast na bradavice patří podráždění kůže, pocit pálení, zarudnutí pokožky nebo reakce v důsledku přecitlivělosti. Pokud by kterýkoli z těchto nežádoucích účinků byl závažný nebo všimnete-li si jakýchkoli nežádoucích účinků neuvedených v tomto návodu k použití, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

DALŠÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A ACETOCAUSTIN

Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky.

CO OBSAHUJE PŘÍPRAVEK ACETOCAUSTIN NÁPLAST NA BRADAVICE

Acetocaustin náplasti jsou tvořeny tkaninou moleskin, která je po celé ploše potažena adhezivním prostředkem s obsahem 40% kyseliny salicylové. Jendo balení obsahuje 20 kusů náplastí na bradavice.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Náplasti Acetocaustin jsou tvořeny tkaninou moleskin, která je po celé ploše potažena adhezivním prostředkem s obsahem 40 % kyseliny salicylové. Jedno balení obsahuje 20 kusů náplastí na bradavice.



Datum spotřeby je uvedeno na spodní straně obalu.

Další informace o přípravku Acetocaustin náplast na bradavice naleznete na stránkách www.acetocaustin.com. S jakýmkoli dotazy ohledně produktu se obraťte na distributora.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK:

Acetocaustin náplast na bradavice je zdravotnický prostředek třídy IIa dle směrnice 93/42/EHS.



Distributor:
AVEPHARMA, s.r.o.
Vajnorská 100
831 04 Bratislava

EC REP E C Rep Ltd,
5 Fitzwilliam Square East
Dublin 2, D02 R744, Ireland

Výhradním výrobcem přípravku Acetocaustin náplast na bradavice pro společnost TheOTCLab je společnost Pharmaplast s.a.e.:

Pharmaplast S.A.E
Amria, Free zone 23512
Alexandria, Egypt



VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Výstražné značky a symboly na obalu a v návodu k použití jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a správného použití tohoto výrobku a pro ochranu vás i ostatních osob před zraněním. Symboly jsou vysvětleny v tabulce níže:

Symbol	Vysvětlení
	Symbol pro výrobce
	Symbol, který značí, že je potřeba nahlédnout do návodu k použití
	Symbol, který značí, že je při používání přípravku nutná opatrnost
	Symbol pro datum spotřeby
	Symbol, který značí, že se jedná o zdravotnický prostředek
	Symbol, který značí, že je třeba chránit produkt před slunečním zářením.
	Značí zdravotnický prostředek určený k jednorázovému použití.
	Uchovávejte mimo dosah dětí
	Není určeno pro těhotné a kojící ženy
	Symbol pro číslo šarže
	Výrobek by měl být skladován při teplotě 0 až 40 °C
	Značí zdravotnický prostředek, který by neměl být používán, pokud byl obal poškozen nebo otevřen.
	Značí přítomnost přírodního kaučuku nebo latexu z přírodního kaučuku jako konstrukčního materiálu použitého ve zdravotnickém prostředku nebo jeho obalu, který může způsobovat alergické reakce.
	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství / Evropské unii

Acetocaustin®

Náplasť na bradavice



PRED POUŽITÍM PRÍPRAVKU ACETOCAUSTIN NÁPLASŤ NA BRADAVICE SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE, AJ KEĎ STE PRODUKT UŽ PREDTÝM POUŽÍVALI. UVEDENÉ INFORMÁCIE SA MOHLI OD OTVORENIA POSLEDNÉHO BALENIA NA ZÁKLADE NOVÝCH VÝSKUMOV A POZNATKOV ZMENIŤ. TENTO NÁVOD NA POUŽITIE SI USCHOVAJTE. PRE PRÍPAD, ŽE DO NEHO BUDETE POTREBOVAŤ ZNOVU NAHLIADNUŤ. PRE DOSPELÝCH A DETÍ (OD 4 ROKOV)

NA ČO SA ACETOCAUSTIN NÁPLASŤ NA BRADAVICE POUŽÍVA?

Acetocaustin náplasť na bradavice zdravotnícka pomôcka na liečbu bežných bradavíc. Acetocaustin náplasť na bradavice obsahuje 40% kyseliny salicylovej, látky, ktorá má na koži keratolytický účinok. Bradavice rozpušťa vrstvu po vrstve s tým, ako kyselina salicylová ničí bunky, ktoré obsahujú vírus bradavíc.

Výhodou produktu Acetocaustin náplasť na bradavice je nebolestivá aplikácia priamo na bradavicu. To znamená, že ho možno používať aj u detí, pokiaľ aplikáciu vykonáva dospelá osoba správnym spôsobom.

Spôsob použitia: (aplikáciu smú vykonávať iba dospelí)

- Pred aplikáciou namočte bradavicu na 5 minút do teplej vody.
- Očistite a vysušte pokožku a skontrolujte, že je miesto bez stôp krému a oleju.
- Vyberte jednu náplasť a odstráňte zo zadnej strany fóliu.
- tráňte zo zadnej strany fóliu.
- Nalepte náplasť na bradavicu, aby sa stred s účinnou látkou nachádzal priamo na bradavici, a uistite sa, že okraje sú hladké.
- Náplasť ponechajte na mieste, kým sa nezačne odlepovať.
- Náplasť je nutné odstrániť najneskôr po 48 hodinách.
- Opakujte tento postup podľa potreby po dobu až 14 dní."

UPOZORNENIE

Nepoužívajte produkt Acetocaustin náplasť na bradavice:

- U detí mladších ako 4 roky (len pod dohľadom lekára)
- Ak ste diabetik, pri precitlivenosti na kyselinu salicylovú alebo ak máte problémy s krvným obehom.
- U tehotných žien a detí: používajte zdravotnícku pomôcku iba pod dohľadom lekára.
- Na genitálne bradavice alebo bradavice v oblasti genitálií.
- Nepoužívajte v blízkosti očí ani na hlbokých ranách.
- Pri kontakte zdravej pokožky s kyselinou salicylovou dôjde k jej poškodeniu.

VAROVANIE

- Len na vonkajšie použitie
- Ak problémy neustúpia, kontaktujte svojho lekára
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí
- Pri použití deťmi, staršími osobami a osobami s fyzickým alebo duševným obmedzením je nutný dohľad dospelého osoby.

• Zabráňte kontaktu s odevmi, textilom, obrusom alebo pokožkou.

- Nepoužívajte opakovane.
- Likvidujte opatrne spôsobom, ktorý zabráni krížovej kontaminácii.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Acetocaustin náplasť na bradavice môže spôsobovať niektoré vedľajšie účinky, ktoré sa však nemusia vyskytnúť u všetkých osôb. Medzi nežiaduce účinky produktu Acetocaustin náplasť na bradavice patrí podráždenie kože, pocit pálenia, začervenanie pokožky alebo reakcia v dôsledku precitlivenosti. Pokiaľ by ktorýkoľvek z týchto nežiaducich účinkov bol závažný alebo ak si všimnete akékoľvek nežiaduce účinky neuvedené v tomto návode na použitie, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

ĎALŠIE LIEKY A ACETOCAUSTIN

Doteraz nie je známe vzájomné pôsobenie (interakcie) s inými liekmi.

ČO OBSAHUJE PRÍPRAVKU ACETOCAUSTIN NÁPLASŤ NA BRADAVICE

Acetocaustin náplaste sú tvorené tkaninou moleskin, ktorá je po celej ploche potiahnutá adhezívnym prostriedkom s obsahom 40% kyseliny salicylovej. Jedno balenie obsahuje 20 kusov náplastí na bradavice.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Prípravok Acetocaustin náplasť na bradavice skladujte pri izbovej teplote (0–40°C) na suchom a tmavom mieste v pôvodnom obale a mimo dosahu malých detí.



Dátum spotreby je uvedený na spodnej strane obalu.

Ďalšie informácie o prípravku Acetocaustin náplasť na bradavice nájdete na stránkach www.acetocaustin.com. S akýmkkoľvek otázkami ohľadom produktu sa obracajte na distribútora.

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA:

Acetocaustin náplasť na bradavice je zdravotnícka pomôcka triedy IIa podľa smernice 93/42/EHS.



Distribútor:

AVEPHARMA, s.r.o.

Vajnorská 100

831 04 Bratislava



E C Rep Ltd,
5 Fitzwilliam Square East
Dublin 2, D02 R744, Ireland

Výhradným výrobcom prípravku Acetocaustin náplasť na bradavice pre spoločnosť TheOTCLab je spoločnosť Pharmaplast s.a.e.:



Pharmaplast S.A.E

Amria, Free zone 23512

Alexandria, Egypt



VYSVETLENIE SYMBOLOV

Výstražné značky a symboly na obale a v návode na použitie sú nevyhnutné pre zaistenie bezpečného a správneho použitia tohto výrobku a pre ochranu vás i ostatných osôb pred zranením. Symboly sú vysvetlené v tabuľke nižšie:

Symbol	Vysvetlenie
	Symbol pre výrobcu
	Symbol, ktorý značí, že je potrebné nahliadnuť do návodu na použitie
	Symbol, ktorý značí, že je pri používaní prípravku nutná opatnosť
	Symbol pre dátum spotreby
	Symbol, ktorý značí, že sa jedná o zdravotnícku pomôcku
	Symbol, ktorý značí, že je potrebné chrániť produkt pred slnečným žiarením.
	Značí zdravotnícku pomôcku určenú na jednorazové použitie.
	Uchovávajte mimo dosahu detí
	Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy
	Symbol pre číslo šarže
	Výrobok by mal byť skladovaný pri teplote 0 až 40°C
	Značí zdravotnícku pomôcku, ktorá by nemala byť používaná, ak bol obal poškodený alebo otvorený.
	Značí prítomnosť prírodného kaučuku alebo latexu z prírodného kaučuku ako konštrukčného materiálu použitého v zdravotníckej pomôcke alebo jeho obale, ktorý môže spôsobovať alergické reakcie.
	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Európskej únii